

手術用フェイスガード【ミーガードクラシック】

# MeGUARD

ミーガードクラシック

Classic

現場の声  
から開発  
されました!

フィルムの透明度と平滑度は世界最高レベルの品質!!  
飛血、飛沫・塵から顔や目を守ります。



フィルム交換式

使い捨てだからいつも  
清潔・快適!

手袋のままでもOK

フィルム交換は簡単着脱・  
簡単調節にこだわりました!

ハネ上げて使用できる

フィルムが邪魔なときは、  
ハネ上げて使用します!

メガネの上から併用できる

カチューシャ式だから  
メガネの上から使用できます!

ハネ上げ時



キャップの額の上部を抑えるように  
装着してください。

新色登場!!

ライトブルー

ピンク

イエロー

レッド

ブルー

本体は5色



別売 ガードフィルム M

【ハーフフェイス】  
顔上半分を保護  
W247mm×H123mm×T130μ

Mサイズ  
10枚入



価格:2,000円(税別)

別売 ガードフィルム L

【フルフェイス】  
顔全体を保護(A4サイズ)  
W248mm×H209mm×T130μ

Lサイズ  
10枚入



価格:3,200円(税別)

フリー  
サイズ

ミーガード クラシック  
本体価格(1本) 1,600円(税別)

製造元

SCOPE Co.,Ltd.

We are the Service Company of Premium Eyewear.

〒916-0022 福井県鯖江市水落町1-10-3  
お客様相談室TEL:0778-52-8002  
URL: <http://scope-optico.com/>



# ミーガードクラシック 取扱説明書

## MeGUARD ミーガードクラシック Classic

●仕様の用途 本製品は、微小な粉塵や水滴程度の液体が顔にかかる事を出来るだけ防ぐ事を目的としています。そのため、本製品は使用者の眼、身体の損傷を防ぐ事を保証するものではありません。

【お願い】フィルムは、高度な技術により生産されておりますが、フィルム全面からキズや汚れを避けて裁断することが困難なため、正面の視野内に認識できないものは許容範囲とさせて頂きます。また、一度ご使用になられた後のキズ・汚れは交換の対象になりません。

### ガード用フィルムの取り付け方法 ※以下、フィルムと称します。

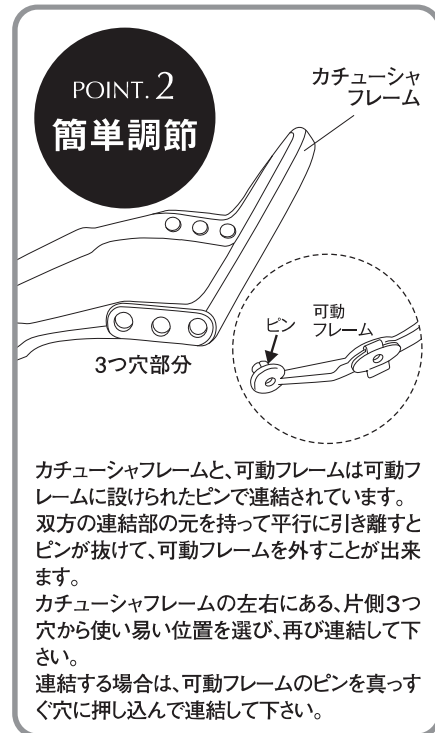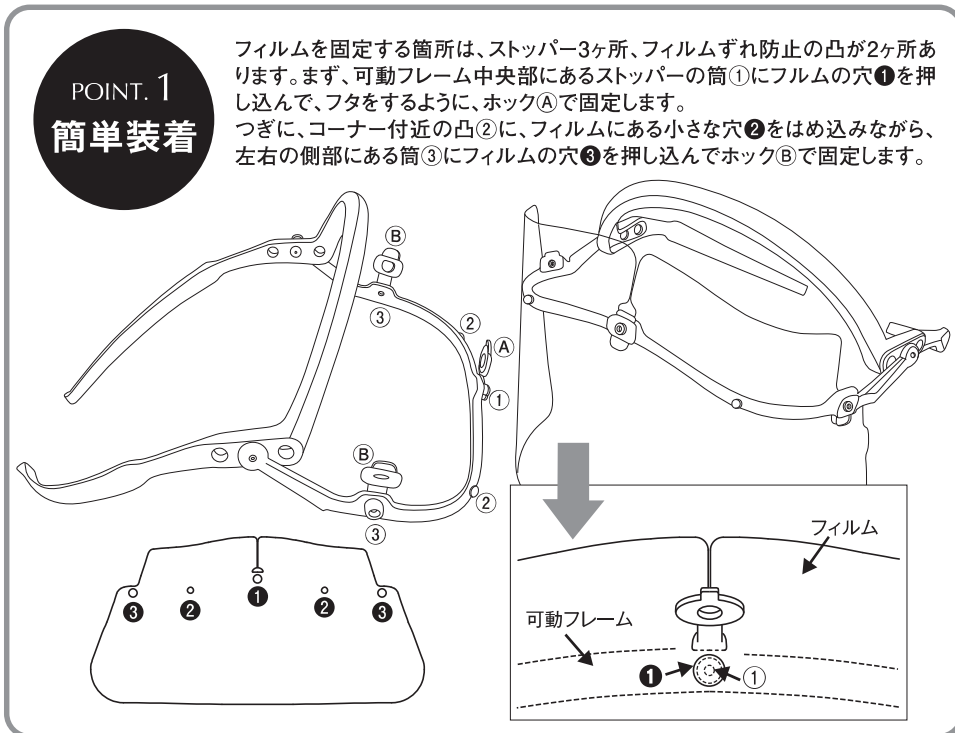

**注意** 取扱いを誤った場合に、けがや物的損傷を負う可能性があります。

### 使用上の注意

- ①本製品は滅菌されていません。有機溶剤等、不適当な薬品を使用した滅菌、清掃はフィルムの劣化、破損の原因となりますので行わないで下さい。
- ②本製品は、片面に保護シートが貼られています。必ず保護シートを剥がしてご使用下さい。保護シートを付けたまま使用すると視野が曇り危険です。
- ③本製品の厚さは、0.13mmと薄いため、使い方を誤ると、手や顔などの皮膚にキズを付ける可能性があります。また、透明度が高いため、目がフィルムを認識し損なう事があります。目に入れて怪我をしないように、また、皮膚にキズを付けないよう注意してご使用下さい。
- ④フィルムに付着した汚れ、防曇効果の低下は安全の妨げになることがあります。汚れたフィルムや複数回の使用は危険です。本製品は単回使用の使い捨てフィルムです。毎回新しいものにお取り換え下さい。
- ⑤ご使用前には必ずフレームとフィルムの取り付け状態、可動フレームとカチューシャフレームの結合状態、フィルムのキズ、汚れ、透明度などを点検し、異常が無い事を確かめてから、上下を間違わないように正しく装着して下さい。
- ⑥ご使用者による改造、修理は事故の原因となり、危険ですので行わないで下さい。

### 取扱上の注意

- ①フレームクリーニングは、ぬるま湯に薄めた中性洗剤で手洗いし、水洗いの後に柔らかい布、あるいは柔らかい紙でふき取して下さい。
- ②フレームの消毒、滅菌には、無水エタノール、又は、次亜塩素酸ナトリウムを6%程度に薄めた溶液をご使用下さい。ガス、熱(煮沸)、及び有機溶剤等、不適当な薬品の使用は、製品の劣化、破損の原因となりますので使用しないで下さい。

### フレームの製品環境安全情報

【有害性情報】本製品は、通常の取扱い方法(本来の使用状態)において、健康に害を及ぼすことはありません。  
 【発火温度】カチューシャフレーム約500℃ 可動フレーム約470℃  
 【燃焼時に発生するガス】一酸化炭素、二酸化炭素、炭化水素、アルデヒド煙、ニトリル化合物などが発生します。  
 【消火方法】水、粉末、泡消火器を用いる事が出来ます。  
 【一般的な廃棄に関する注意】一般的なプラスチックゴミとして、市町村条例に従った分別廃棄をして下さい。  
 【保管上の注意】直射日光を避け、低温、低湿度の場所に保管し、製品、包装に水、溶剤、ガスなどをかけないで下さい。

商品名	品番	販売単位	定価	JANコード
ミーガード本体 ブルー	MEGC-B	1本	1,600円	4580358031117
ミーガード本体 レッド	MEGC-R	1本	1,600円	4580358031124
ミーガード本体 イエロー	MEGC-Y	1本	1,600円	4580358031131
ミーガード本体 ピンク	MEGC-P	1本	1,600円	4580358031148
ミーガード本体 ライトブルー	MEGC-LB	1本	1,600円	4580358031155
ミーガード専用交換フィルムMサイズ	MEG-1F (M)	1パック10枚入り	2,000円	4580358030059
ミーガード専用交換フィルムLサイズ	MEG-1F (L)	1パック10枚入り	3,200円	4580358030066

⚠ 本製品は滅菌されていません。

別売	Mサイズ フィルム	【ハーフフェイス】顔上半分を保護 W247mm×H123mm×T130μ
	Lサイズ フィルム	【フルフェイス】顔全体を保護(A4サイズ) W248mm×H209mm×T130μ

カチューシャフレーム / ABS耐熱 約70℃  
 可動フレーム / PP耐熱 約120℃  
 重量 / 約24.0g (Mフィルム付き)  
 約26.0g (Lフィルム付き)  
 ※製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。

製造元  
**SCOPE Co.,Ltd.**  
 〒916-0022 福井県鯖江市水落町1-10-3  
 お客様相談室TEL: 0778-52-8002  
 URL: <http://scope-optico.com/>  
 We are the Service Company of Premium Eyewear.